



レインボーがお勧めする


最新版

レンズケアのベストな方法

レンズを使い終わった後のケアの仕方です翌日の装用感がガラリと変わります。レインボーがお勧めする最新のベストなケア方法についてお教えします。

コンタクトレンズを外してから、次につけるまで

毎日、快適にお使いいただくための一連の流れ

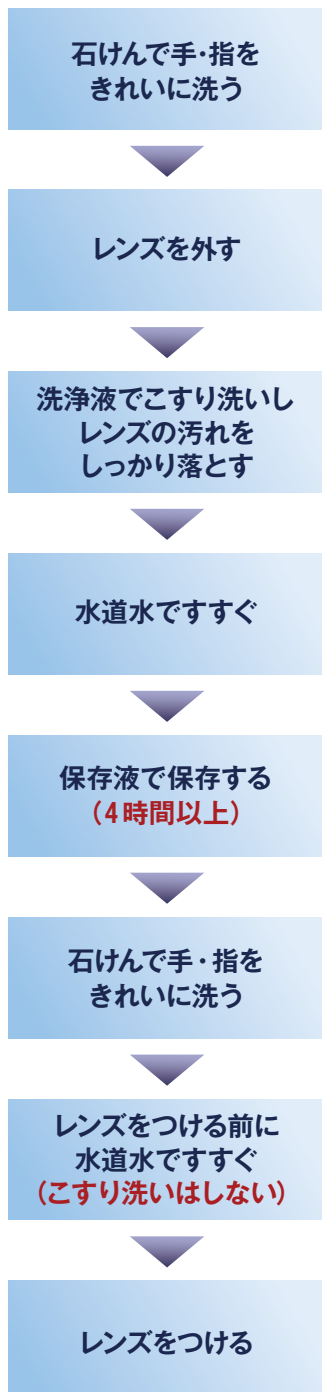

ハイ・クリーンPRO(洗浄専用液)

■特長

脂質・油脂類の頑固な汚れが、ハイ・クリーンPROを使ってこすり洗いすると、きれいに落ちます



POINT 1

ハイ・クリーンPROはレンズに付着した汚れを浮き上がらせて、落としづらい油脂類の汚れをきれいに落とします。

レンズをこすり洗いするときにお使いください。アルコールなどのレンズを傷める成分を含んでいないので、毎日安心してお使いいただけます。

レンズの汚れが気にならない方は
モイストワン プラスを洗浄液としてもお使いいただけます。

モイストワン プラス(洗浄・保存液)

■特長

保存中にタンパク汚れをきれいに落とし、レンズ表面を潤いのパールで包み込みます



POINT 2

モイストワン プラスは、こすり洗いしても落とさきれないタンパク汚れを酵素の力によってレンズの保存中に分解除去し、きれいに落とします。また保湿成分がレンズ表面に潤いのパールをつくるので、レンズに汚れが付きにくくなりつけ心地も良くなります。

※レンズをつける前に水道水ですすぐとき、こすり洗いをしないようご注意ください。こすり洗いすると保湿成分がとれてしまいます。

コンタクトレンズの快適なつけ心地はモイストワン プラスによるレンズの保存が鍵となります。ハイ・クリーンPROでレンズをきれいにすることによって、モイストワン プラスの効果を最大限に発揮できるのです。